

Инструкция по использованию набора для выявления антител к *Brucella* spp. «Brucella Ltflow»

Набор представляет собой тест-кассету с биологическими компонентами, которые позволяют провести анализ на присутствие антител к возбудителям бруцеллеза *Brucella* spp. в крови и молоке домашних и диких жвачных животных. Визуально накопление антител к *Brucella* проявляется в виде окраски линии в окошке тест-кассеты.

Состав набора:

- тест-кассета - 1 шт
- флакон с буферным раствором - 1 шт
- одноразовая пипетка - 1 шт

Фармацевтическая группа. Тест-система для диагностики *in vitro*.

Вид животных. Крупный рогатый скот, овцы, козы, лоси, олени, косули и др. жвачные, свиньи, кабаны.

Назначение набора. Набор предназначен для выявления антител к *Brucella* в крови, сыворотке крови, плазме крови, молоке.

Предостережение:


- Не использовать наборы, у которых закончился срок годности, поврежденные реагенты, или реагенты из других наборов

Подготовка к анализу.

Перед началом работы (если требуется) все компоненты набора или образцы для анализа необходимо выдержать при комнатной температуре (18–25 °C) в течение 30 мин.


Проведение анализа

- освободите тест-кассету от упаковки и поместите ее на ровную горизонтальную поверхность.
- при помощи одноразовой пипетки во флакон с буферным раствором внесите 1 полную каплю исследуемого образца (сыворотки крови/плазмы крови, свежей крови или крови стабилизированной антикоагулантом, молока). Освободите пипетку от остатков образца и осторожно перемешайте смесь пипетированием.
- при помощи пипетки перенесите 3-4 полные капли (без пузырьков воздуха) смеси в отверстие "S" тест-кассеты.
- проанализируйте результат через 5-10 мин после начала появления цветной жидкости в тестовом окошке. Результат анализа после 15 мин является некорректным.

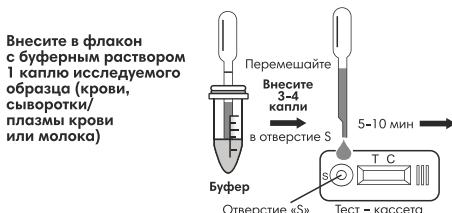

Результат

T – тестовая линия
C – контрольная линия

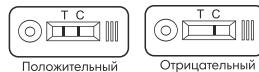

Положительный результат Отрицательный результат



Положительный результат Отрицательный результат Недействительный результат



Положительный результат – в окошке тест-кассеты появляются 2 окрашенные линии – тестовая и контрольная. Положительным считается результат независимо от интенсивности окраски тестовой линии.

Отрицательный результат – в окошке тест-кассеты появилась только одна контрольная линия. Тестовая линия отсутствует.

Недействительный результат – в окошке тест-кассеты отсутствует контрольная линия.

Внимание! Если анализ проведен правильно, контрольная линия в окошке тест-кассеты должна проявляться всегда, независимо от наличия или отсутствия антител к *Brucella* в исследуемом образце. Если контрольная линия отсутствует, анализ считают недействительным. В таком случае необходимо повторить тест.

Срок годности: 12 мес

Хранение и транспортировка.

Хранить и транспортировать набор в темном сухом месте