

Городская клиническая больница №31
патологоанатомическое отделение, гистологическая
лаборатория.
санкт- петербург пр. Динамо 3
р.т. 812 2350813

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ С АДГЕЗИВНЫМ
ПОКРЫТИЕМ СИЛАН С ШЛИФОВАННЫМИ КРАЯМИ И ПОЛОСКОЙ ДЛЯ ЗАПИСИ.**

Стекло ровное и прозрачное, герметично упаковано. Сторона с адгезивом маркирована литерой S. исследуемые образцы применялись для приготовления криосрезов (криостат Leica) методика - изготавливались криосрезы ткани легкого и печени (аутопсийный материал) толщиной 6 мкм. Монтировались на предметное стекло. Далее немедленная фиксация образцов в смеси формалин-спирт-уксусная кислота, в течение 5 мин., с последующим окрашиванием гематоксилин эозином по стандартной методике с заключением под покровное стекло.

Результаты: все срезы показали надежную адгезию, результаты окраски идентичны материалу, проведенному по стандартной спиртовой проводке

зав. патологоанатомического отделения ГКБ №31

Смирнов Д.Р.

29.05.13

